

Durchführen des Wangenschleimhautabstrichs


Sie erhalten von uns für jeden Probanden jeweils
2 Wangenschleimhautabstrichbürsten
2 Sterile Röhrchen für den Probenversand

Um eine sichere Analyse zu gewährleisten, fertigen Sie bitte von jedem Probanden auch zwei Wangenschleimhautabstriche (einmal rechte und einmal linke Wangentasche) an. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

1. Entnehmen Sie eine der eingeschweißten Abstrichbürsten ohne das gezackte Ende zu berühren. Reiben Sie mit der gezackten Seite der Abstrichbürste ca. zehnmal mit starkem Druck über die linke bzw. die rechte Innenseite der Wange des Probanden.



2. Schrauben Sie jetzt eines der kleinen sterilen Probenröhrchen auf und schieben den Kopf der Abstrichbürste durch Druck auf das Ende hinein. Verschließen Sie das Röhrchen sofort wieder und beschriften Sie das Röhrchen mit Namen und Vornamen des Probanden (Edding-Stift, alternativ kann ein kleiner Zettel mit Tesafilm fest am Röhrchen befestigt werden).

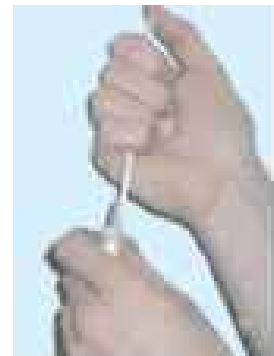

3. Mit der zweiten Abstrichbürste wiederholen Sie das Verfahren in gleicher Weise und beschriften das Probenröhrchen jeweils entsprechend.